


分配コンセンソの種類と 表示変更方法に関するご案内

分配コンセントの種類について

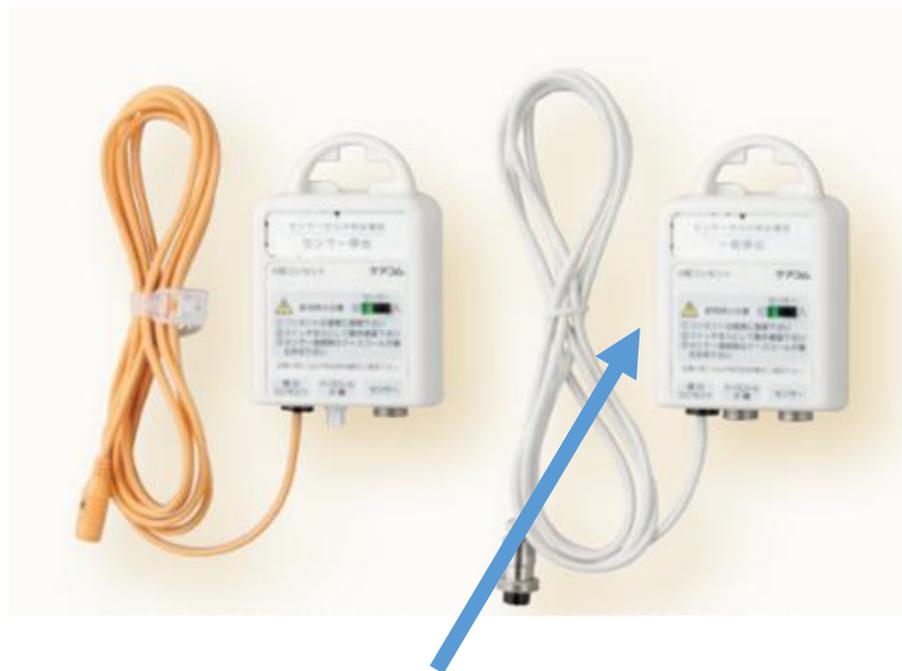

側面に型名の記載があります。

分配コンセントの OP1 と NC の2つの型名の
違いについてご説明いたします。

お客様にご利用いただいている分配コンセントの型名は
本体側面に記載された型名ラベルでご確認いただけます。

- ▶ BB-301WZ-2P/W6P-OP1 のように末尾が「OP1」の製品
- ▶ BB-301WZ-2P/W6P-NC のように末尾が「NC」の製品

※ BB-301EX-2P, BB-301EX-3Pについてはp5をご参照ください。

OP 1 とNCの違いについて

2つの製品の違いは主に呼出の区別ができるか・できないかです。

NCはセンサーからの呼出もナースコール親機やPHSなどに一般呼出として表示されます。

そのため、ナースコール子機（押ボタン）からの呼出なのか、センサーによる呼出なのか区別することができません。

一方OP 1の場合はセンサーからの呼出は初期設定でトイレ介助などと表示され、

ナースコール子機（押ボタン）からの呼出は一般呼出として表示されるので、

どちらからの呼出なのか区別することができます。

また、トイレ介助など初期設定の表示をナースコール親機の操作で変更することが可能です。

一般呼出
801-1

図1

トイレ介助
803-1

図2

型名末尾	センサー呼出の表示	ナースコール子機の呼出表示	区別可否
NC	一般呼出(図1)	一般呼出(図1)	区別できない
OP1	トイレ介助、トイレ、センサーなど(図2)	一般呼出(図1)	区別できる

ナースコール親機表示イメージ

表示変更方法について

OP1の分配コンセントを使用していて、かつご利用いただいているナースコールシステムがNICSS-R5,R7,R8／NICSS-EX3,EX8／PLAINH NICSS／CICSS-R5／CICSS-EX3,EX5のいずれかの機種である場合は、ナースコール親機にて表示を変更することが可能です。

ご利用中のシステム名をクリックしていただくと設定手順をご確認いただけます。

※2012年以前に導入いただいた機種の場合は弊社サービスマンがお伺いし、表示の変更をすることが可能です。最寄りのオフィスへお問い合わせください。



PLAINH NICSS



NICSS-EX8
NICSS-R8



NICSS-R5
CICSS-EX5
CICSS-R5



NICSS-EX3
CICSS-EX3
NICSS-R3



本体側面に型名の記載があります。

【BB-301EX-2P, BB-301EX-3Pについて】

BB-301EX-2P, BB-301EX-3Pも呼出の区別ができます。

初期設定で、センサーの呼出とナースコール押ボタンの呼出を区別します。

センサーの呼出はナースコール親機、PHSなどには「トイレ介助」と表示されます。

なお、この表示はナースコール親機側の設定であらかじめ登録されている他の名称（「センサー」等）に変更が可能です。

お客様の方でナースコール親機の設定メニューから操作できます。（p4をご参照ください。）