

ヘルスケア情報統合型ナースコール

PLAIMH NICSS

プライマ ニックス

看護師の働き方に
もっと自由を



ケアコム

Anniversary
65th



ヘルスケア情報統合型ナースコール

PLAIMH NICSS

プライマ ニックス

が、看護師の 働き方を変える。

患者さんに喜んでいただくケアのためには、
看護師が笑顔で働ける環境づくりが不可欠です。
ヘルスケア情報統合型ナースコールPLAIMH NICSSは、
看護に必要な情報や人をつなぎ、共有できる環境を
つくすることで看護業務に伴うプレッシャーや
ストレス、不要な重複業務を削減。
もっと自由に、楽しく働ける環境づくりをお手伝いします。

動線を短縮

ロケーションフリー

病棟内のどこにいても必要な情報や
通知を受け取れる環境を実現。
スタッフステーションに戻る
動線を大幅に減らします。

不安や ストレスを軽減

ストレスフリー

緊急時には必要な情報を提供し、業務
集中時には不要な通知をシャット
アウト。業務に専念しやすく、
ストレスの少ない環境を
実現します。




PLAIMH
NICSS

さまざまな 看護体制に適応


スタイルフリー

多様な病棟レイアウトに対応できる
ラインアップで多様な看護体制を
支援。看護の課題の「見える化」に
役立つデータを提供することで
看護の合理化に貢献します。



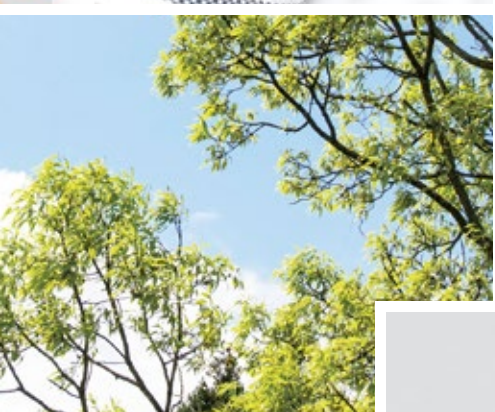

複数の呼出が重なっても、 その場で対応の優先順位が判断できる

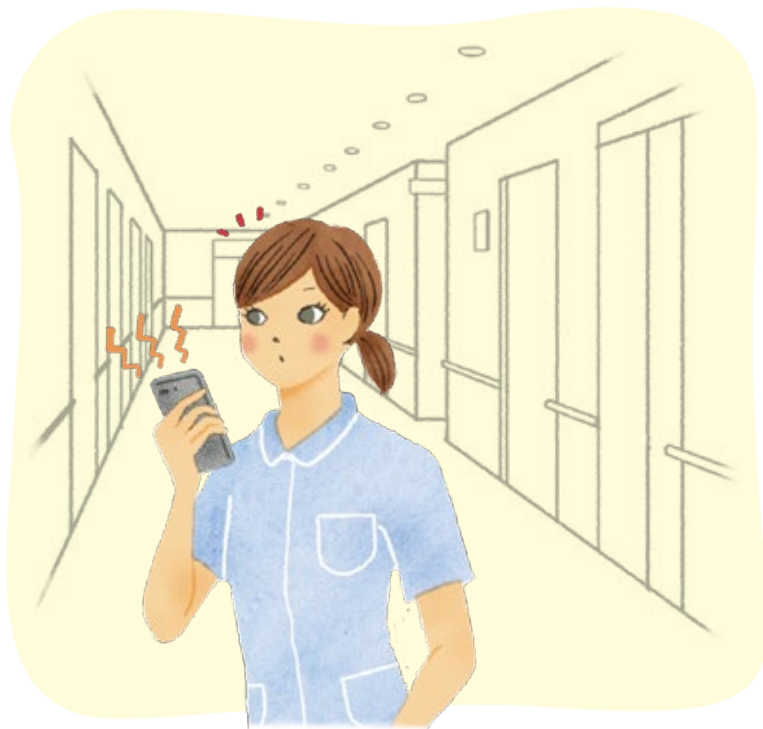

スマホや電子カルテ用ノートパソコンに
複数の患者呼出を同時に表示

NICSSモバイル機能ソフト（オプション）

スマートフォンや電子カルテ用ノートパソコンに
複数の呼出表示が可能。その場で呼出患者情報が
確認できるので対応の優先順位を判断できます。
対応ボタンを押すと他の端末で対応状況も確認
でき、適切な対応をサポートします。



スマートフォン



呼出ポップアップ



電子カルテ用ノートパソコン

病室の映像をスマホ画面に表示

IPカメラ連動

呼出時には、患者さんの状態がわかる画像をスマー
トフォンに通知。応答すると映像を表示します。状態
を即座に把握できるので的確に対応できます。

※内線電話用スマートフォンとの連動時



スマートフォン

※IP-PBXおよび端末の機種により、表示内容が異なります。

詳しくは
P26

必要な情報が呼出時に確認でき、 適切に対応できる



手が離せない業務中の場合、
呼出表示機能が自動でオフに


NICSSモバイル機能ソフト（オプション）

輸液や配薬の準備中など、手が離せない業務中であることをスマートフォンに設定しておく、その業務中は呼出を表示しません。
ナースコールによる業務中断で起こるインシデント防止に役立ちます。



スマートフォン

呼出による業務中断を防ぎ、
業務に専念できる

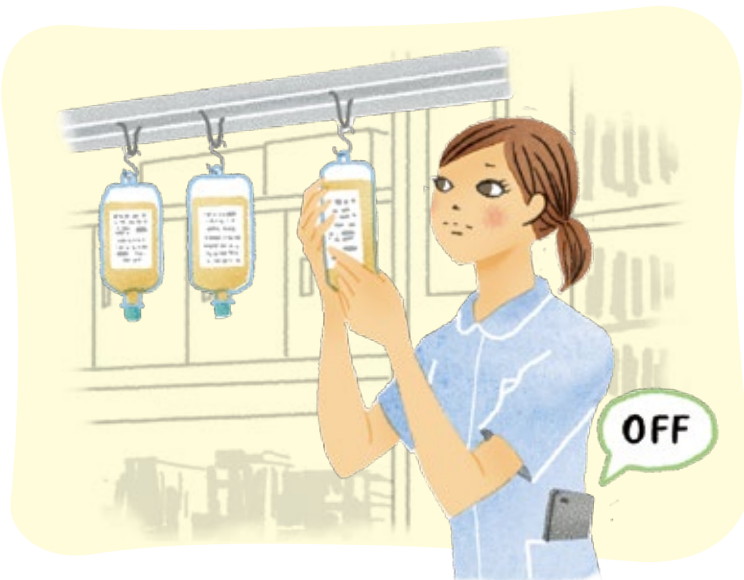


定期的に見回らなくても、
注意すべきタイミングにお知らせ



患者さんが特定エリアに一定時間
滞在すると、ナースコールでお知らせ

エリア検知呼出システム（侵入検知）

スタッフの目が届かない特定エリアにIoTゲートウェイを設置しておくことで、ICタグを身につけた患者さんが一定時間滞在するとお知らせします。

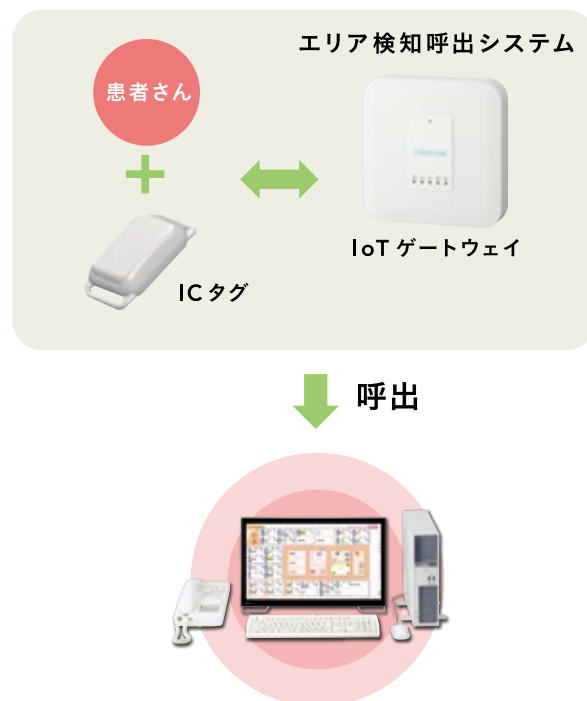


患者さんの離棟を未然に防げる



患者さんが病棟出入口付近に
近づくと位置情報を検知してお知らせ

エリア検知呼出システム（離棟検知）


ICタグを身につけた患者さんが出入口方向へ
移動すると、病棟出入口付近に設置された2台
のIoTゲートウェイが検知してお知らせします。

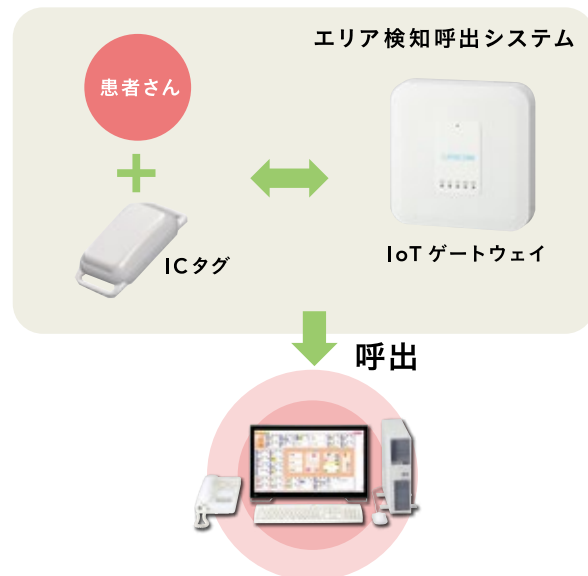

特定の患者さん同士が近づくと、
その場所や患者さんの氏名をお知らせ

エリア検知呼出システム（近づき検知）

ICタグを身につけた特定の患者さん同士が近づくと、
対象の患者氏名や該当エリアを検知してお知らせ。
患者さん同士のトラブル回避をサポートします。

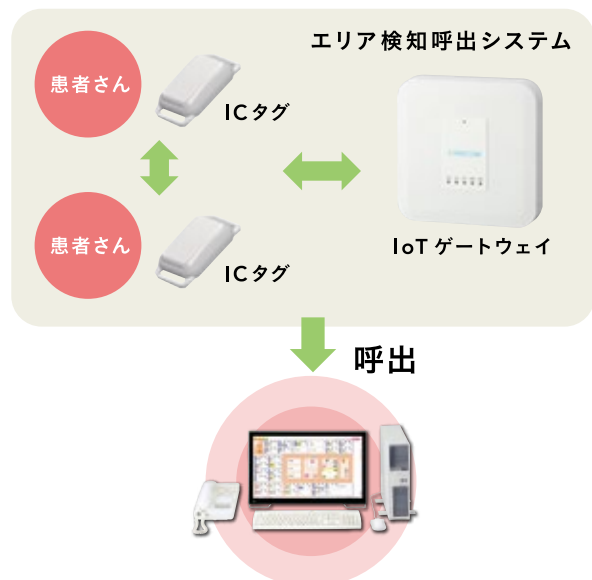

患者さん同士のトラブルを回避できる



患者さんが便座から立ち上がろうとするとナースコールでお知らせ

トイレ離座検知システム

ナースコールを押さない・押せない患者さんの立ち上がり動作をセンサーが検知。転倒する前にスタッフが駆けつけられるようサポートします。



TOTO 前方ボード
(はね上げタイプ)



TOTO 前方ボード
(スイングタイプ)



トイレ離座センサー
(前方ボード用)

TOTO
トイレ離座センサー
専用ウォシュレット

※ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

詳しくは
P26

トイレでの転倒リスクに
いち早く対応できる



スマートフォンや PHS で
アラートが分かる




生体情報モニタや
スマートベッドシステム™の
アラートをナースコールでお知らせ

ME 機器連動 / スマートベッドシステム 連動

生体情報モニタや呼吸数、心拍数、睡眠、覚醒、離床をセンシングするパラマウントベッド株式会社製のスマートベッドシステム™と連動し、各種アラートをスマートフォンやPHSに通知。アラート要因、ベッド番号などの情報を受け取れます。




生体情報モニタ
(写真は日本光電工業株式会社製)

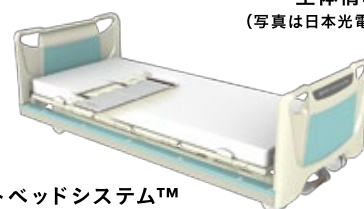

スマートベッドシステム™
(パラマウントベッド株式会社製)

さまざまな看護体制に対応可能

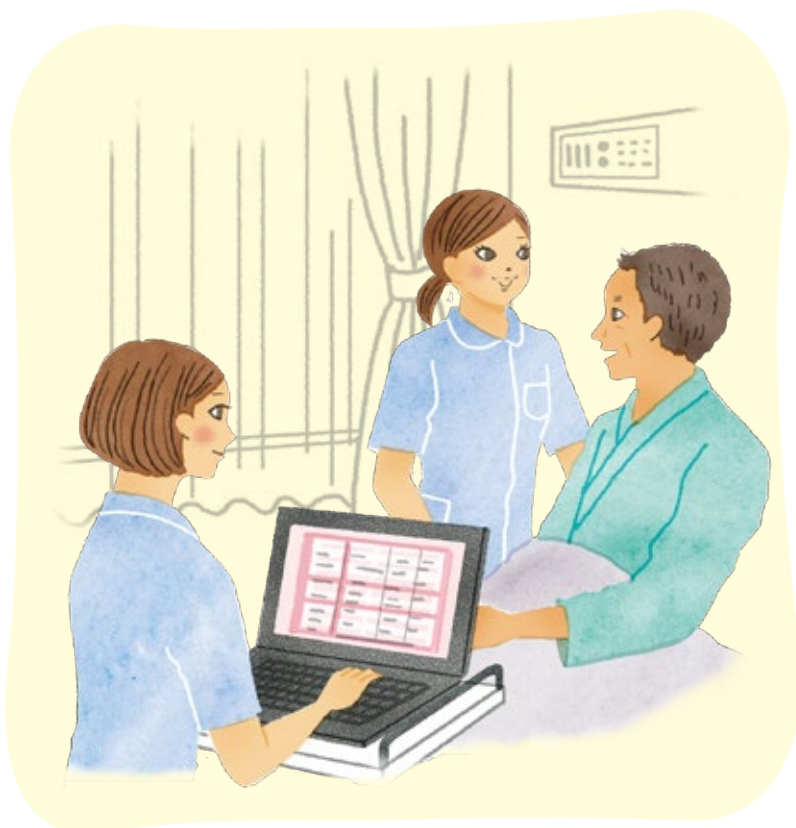

電子カルテ用ノートパソコンで
ナースコールの対応記録が可能

Webアプリケーション

Webアプリケーションを使えば、病棟ラウンド中でも電子カルテ用ノートパソコンのブラウザでPLAIMH NICSSの機能が使用可能。スタッフステーションに戻ることなく呼出理由の記録や履歴、患者情報の参照も行えます。ベッドサイドで間接看護業務も行うさまざまな看護体制に対応できます。




呼出履歴更新画面

作業スペースに合わせて
親機が選定できる

充実した親機ラインアップ

PLAIMH NICSSはスタッフステーションのレイアウトや使い勝手で選べる多様な親機タイプをご用意。病棟のつくりに合わせてスタッフステーションのカウンターや壁面、サテライトステーションなど自由に設置でき、多様な看護体制に対応できます。

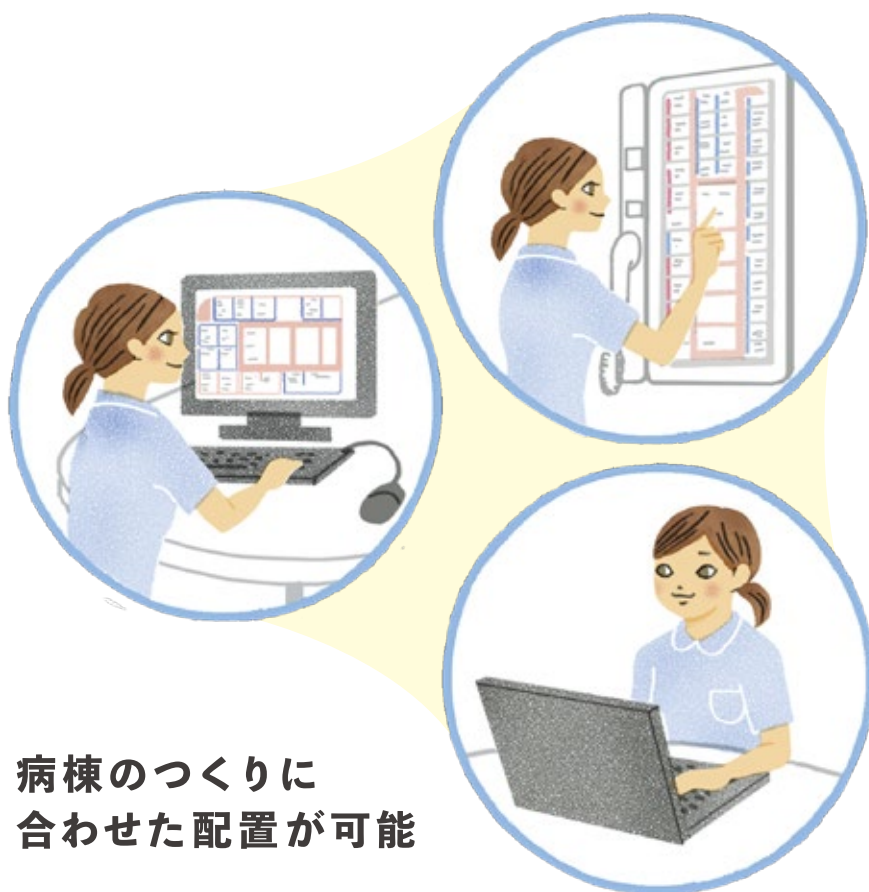


病棟のつくり
合わせた配置が可能

災害時、救助が必要な 患者さんのいる病室を廊下灯に通知

セキュリティ機能

地震や火災などの災害時、救助が必要な患者さんがいる病室の廊下灯を、NICSS親機やスマートフォン（オプション）で一斉に点滅させることが可能。廊下灯を救助作業に役立つ「めじるし灯」として活用できます。

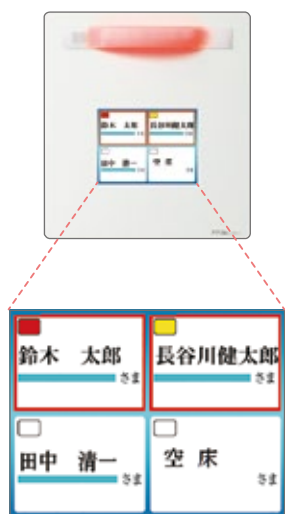

個別情報廊下灯



スマートフォン（オプション）

救助が必要な病室を、 瞬時に把握できる



システムの一部に
不具合が起きても
継続してケアが提供できる
環境を実現

BCP対応

システムのトラブルや災害でPLAIMH NICSSのメイン制御部が故障した場合でも患者さんからの呼出を廊下灯に音と光でお知らせ。万一の事態が発生した場合での、ケアの継続をサポートします。

システム故障などの 緊急時でも廊下灯で応答可能




グラフにした呼出履歴から、
看護の課題や患者ニーズが把握できる

ナースコール履歴管理

時間帯別の呼出回数や患者さん別の呼出回数を病棟または病院全体で集計し、グラフ化。呼出回数の多い患者さんや時間帯の把握に役立ち、ケア計画の見直しに役立てられます。Webアプリケーションを使えば、NICSS親機以外のパソコンでも使用できます。

詳しくは
P16

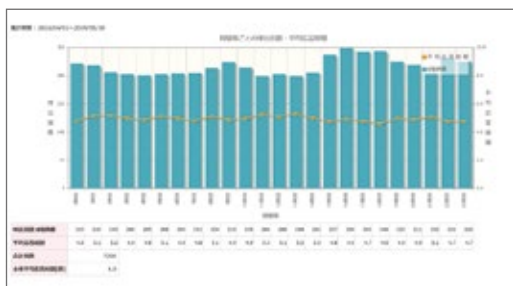

時間帯別呼出回数(病棟全体)

課題の見える化で
解決策が検討しやすくなる




タブレットでカンタンに
看護の業務量が把握できる

業務量をさまざまな切り口でグラフ化、
業務実態と課題の把握をサポート

タイムスタディ支援サービス(オプション)

どのような業務にどれだけ時間がかかっているのか、タブレットに入力することで業務量の全体像を「見える化」するサービスです。入力いただいたデータをもとにケアコムが、病棟別、時間帯別、業務内容別などの項目でグラフ化したデータとCSVデータをご提供。課題の分析に役立てられます。

※NICSSとは別に単体で使用できます。

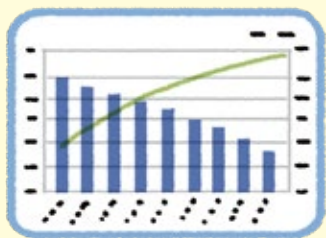

タブレット

検査、手術、他科受診など 患者さんの予定を一覧で表示

患者予定シェアボード機能ソフト（オプション）

電子カルテと連動させることで、他部門にも関連する患者さんの予定を、進捗状況とともに1つの画面内に集約して表示。入退院、検査、手術、面談予定などの予定を多職種間で共有でき、効率的なチーム運営をサポートします。

詳しくは
P18

※画面は変更となることがあります。

患者予定シェアボード画面(参考)



患者さんの予定が スタッフ間で共有できる

院内感染が発生した場合 対処法がすぐに策定できる

転棟・転ベッドの記録が トレースできる

ベッドトレース機能ソフト（オプション）

患者さんの入院から転棟・転ベッドの記録をトレースすることが可能。万一、院内感染が発生した場合、その患者さんの軌跡を確認し、二次、三次感染の疑いがある患者さんを特定して、スピーディーに対策を講じることができます。

詳しくは
P19

※画面は変更となることがあります。

ベッドトレース画面(参考)

過去のベッド配置を再現して、感染の可能性が高い患者さんをさまざまな観点からリストアップが可能



PLAIMH NICSS ラインアップ

机やカウンター上に設置できる

NICSS親機 デスクトップ形



※ディスプレイは23型または32型を選べます。(壁掛け可能)

立った姿勢のままで操作しやすい

NICSS親機 壁掛形




※ディスプレイ：32型
※別途パソコンが必要です。



※ディスプレイ：32型(壁掛けイメージ)
※別途パソコンが必要です。

NICSS親機と異なる画面表示が可能

大型サブディスプレイ

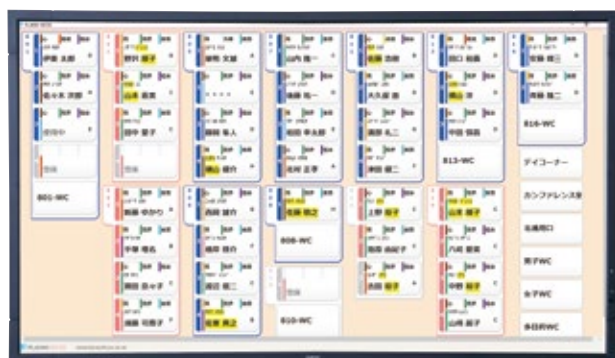

※ディスプレイは43型で、壁掛けまたは天井吊り下げを選べます。

親機と大型サブディスプレイで
Wディスプレイ対応4コンテンツ表示が可能




親機

大型サブディスプレイ



インターフェイスデザインを一新

優しく暖かみのあるピンクを基調としたディスプレイ表示。
全体的に丸みをもたせた柔らかなデザインです。

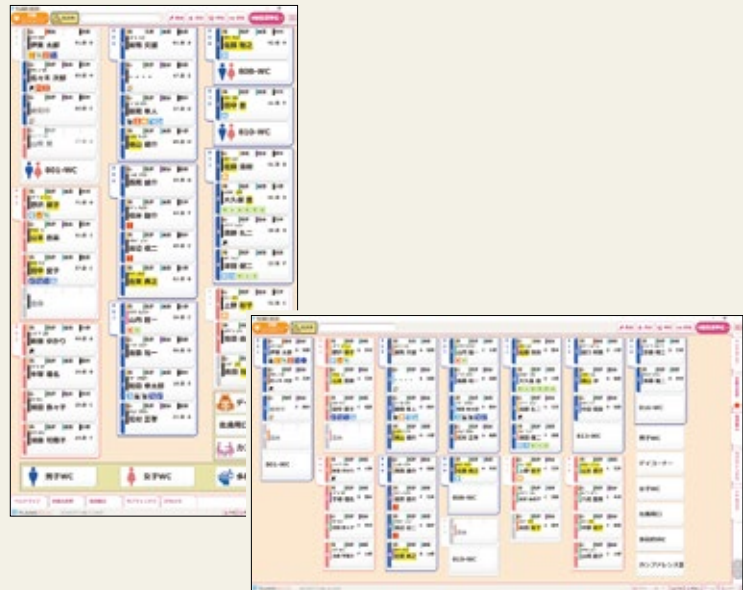

笑顔がチェックできる スマイルミラー

患者さんに会う前の笑顔
をチェックできるミラー
付きです。



不快な衝突音を解消する 受話器衝突音防止センサー

受話器を戻す際に聞こえてしまう
「ガチャ」という衝突音を、セン
サーが感知してベッドサイドに出さ
ないようにします。



病棟内のどこにいても 呼出を把握できる

NICSSモバイル 機能ソフト

OPTION



※パソコン用とスマートフォン用の
ソフトウェア使用ライセンスのご提供です。
※写真のナースカートは株式会社オカムラ製
スマートナースカートです。

親機 機能紹介

ベッド表示

病床状況が一覧で把握できる

病床状況を表示する画面は、自由に切り替えられる2タイプをご用意。「ボード表示タイプ」は、多くの患者情報を確認するのに便利です。



ボード表示タイプ 患者情報をシンプルに一覧表示。

「レイアウト表示タイプ」は、病室の配置をイメージしているので、新しく病棟に配属された看護師や他職種のスタッフでも一目で把握できます。



レイアウト表示タイプ 病室の配置をイメージした表示。

強調表示

気になる患者さんが一目でわかる

直近の入院患者や転入患者、退院予定者、長期入院患者を強調して表示することができます。勤務開始時やカンファレンスの際に情報収集すべき患者さんが一目でわかります。


- 本日入院患者
 - 今週入院患者
 - 本日退院予定患者
 - 今週退院予定患者
 - 長期入院患者
- を強調表示できます。



同姓同名注意喚起

同姓同名の患者さんがいることが一目でわかる

同姓同名の患者さんがいた場合は、その患者さんの氏名に黄色の背景色をつけて注意を促します。
(同姓の場合、姓のみに黄色の背景色を表示します。)

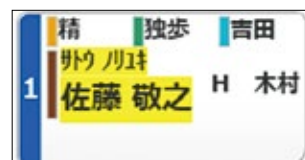

患者情報表示

患者さんの情報が一目でわかる

救護区分、感染症の有無と感染経路、診療科目、担当医師・担当看護師等の情報を文字やアイコンで表示することができます。院内情報システムとの連動で、これらの情報は自動登録され、入力業務の手間を削減できます。


※連動オプションが必要です。

感染症の状況もリアルタイムで確認できる

院内情報システムと連動すれば(オプション)、検査科で入力された感染症情報が、NICSS親機にリアルタイムで表示されます。

画面のタッチで
患者さんの
情報が収集できる

ベッド表示画面で患者氏名をタッチすると、患者情報の詳細を参照できます。

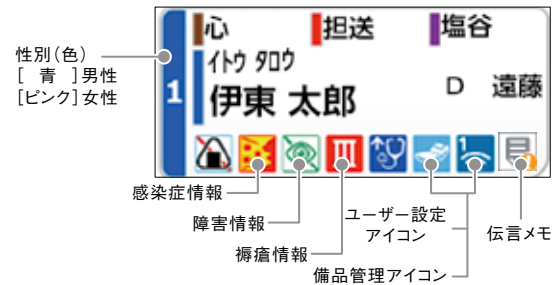

備品の使用状況も確認できる

エアーマットレスなどの備品を使用している患者さんをお知らせ。物品管理がしやすくなります。

患者さんに関する
申し送り事項を確実に届けられる

スタッフ間で患者さんに関する申し送りがある場合、ベッド表示の患者情報表示部に伝言メモのアイコンを表示。伝言を見たい患者さんを画面上で選択すれば内容を確認でき、伝達漏れを防げます。



通知設定表示

離床センサー内蔵ベッドの
ON/OFF設定状態をアイコンで表示

スタッフステーションから病室の離床センサー内蔵ベッドの通知ON/OFFの状態が確認できます。



ベッド内蔵式センサー「離床CATCH」を連動させると、患者さんの動作が確認できます。

選べる4種類の通知タイミング

- 起き上がり
患者さんが起き上がったときに通知
- 端座位・離床予報
患者さんが端座位をとったとき、もしくはベッドから立ち上がるときに通知
- 離床
患者さんが離床したときに通知
- 見守り
離床してから一定の時間が経過したら通知


※「離床CATCH」は、パラマウントベッド株式会社製です。

センサー接続表示

マットセンサー等を使用している
患者さんが一目でわかる

マットセンサー等を使用するために、ベッドサイドのナースコール用コンセントにマルチアクシード2Aを接続すると、自動でNICSS親機にアイコンを表示してお知らせ。

注意が必要な患者さんであることが一目でわかります。

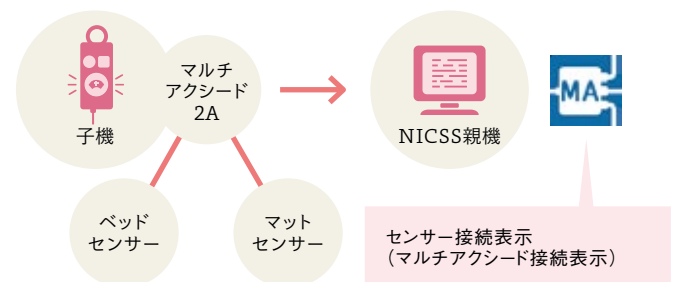

親機 機能紹介

呼出ポップアップ機能

担当医師や担当看護師、 患者さんの情報が一目で確認できる

呼出画面に、患者さんの氏名はもちろん、呼出種別、担当看護師名、チーム、診療科などをポップアップ表示。誰からの呼出なのかが一目で把握でき、素早く対応できます。

呼出ポップアップのサイズは呼出種別ごとにサイズを「大」「中」「小」の3種類から選べます。Wディスプレイ構成時には、呼出ポップアップを「メインディスプレイ」「サブディスプレイ」のそれぞれに表示する/しないを設定できます。

ポップアップ表示色で呼出種別をお知らせ

オレンジ 一般呼出、トイレ介助・点滴終了 **赤** 緊急呼出、トイレ/浴室呼出
緑 汎用（センサーからの呼出などに利用できます） **紫** 脱着警報



メインディスプレイ



サブディスプレイ

親機画面でナースコール各種設定が可能

呼出通話の操作、PHSへの呼出設定など、複雑な設定がNICSS親機の画面で簡単に行えます。また、親機から病室への一斉放送も行えます。


センサー呼出区別

センサーからの呼出を 他の呼出と区別してお知らせ

各種センサーからの呼出は押ボタンと区別してお知らせ。呼出の優先度をその場で判断できます。

センサーからの呼出優先順位を 変更することも可能


特に注意が必要な患者さんのセンサーからの呼出は、優先して着信させたり、違う呼出音に変更することが可能です。

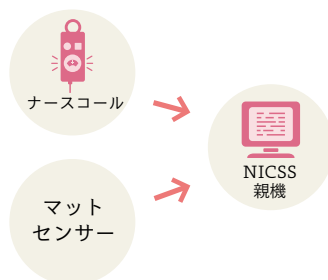

ナースコール



マットセンサー呼出

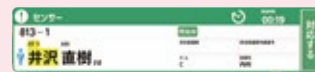

押ボタンとセンサーからの呼出を区別して通知



優先着信

特に注意が必要な患者さん



緊急度の高いセンサーを優先着信

特定呼出

特定の呼出理由をお知らせ

特定呼出ボタン付の子機を使用した場合、トイレ介助の呼出なのか点滴終了の呼出なのかを把握することが可能です。

詳しくは
P21

個別音量設定

患者さん毎に適切な音量が設定できる

ベッド毎に患者さんに合わせた呼出音量が設定可能。聞きとりにくい、声が大きすぎるなどの問題を解消します。また、夜間は自動で音量が下がるので、患者さんの安眠を妨げません。

ナースコール履歴管理

呼出履歴が確認でき、リアルタイムでグラフ表示できる

病棟で発生したナースコールやセンサーの呼出を一元管理し呼出履歴を表示。病棟の忙しさの把握、業務の平準化の検討などの業務管理に役立ちます。また時間帯別の呼出回数のグラフを前日と比較してスクリーンセーバー上に表示します。

呼出履歴一覧

個人別・病棟単位で呼出履歴をグラフ化できる

時間帯別の呼出回数や、個人別の呼出回数を病棟全体で集計し、グラフ化することが可能。呼出回数の多い患者さん、呼出回数の多い時間帯の把握に役立ち、業務改善の立案を支援します。

※集計結果の印字はオプションとなります。

時間帯別呼出回数
(病棟全体)
時間帯別の呼出回数を集計。



個人別呼出回数
個人別の呼出回数を集計。




アラーム

患者さんから呼ばれる前に登録したアラームで知らせてくれる

患者さんが痛みを訴える前や、トイレに行きたくする時間に合わせ、呼出履歴から次の呼出のタイミングを予測し、手動で時刻を設定しておけば、アラームでお知らせ。患者さんが呼ぶ前の先取りケアをサポートします。


※一定時間後に声かけが必要な患者さんなど、手動でアラーム設定することも可能です。

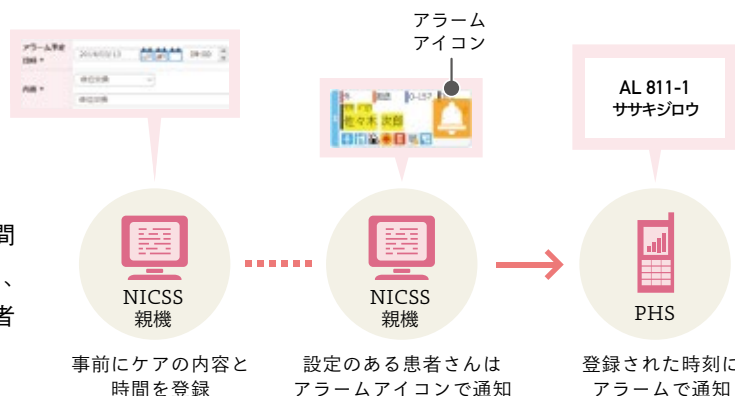

患者情報表示

シーンに合わせてアイコン表示切替ができる


患者情報を伝えるアイコンは、閲覧するスタッフやシーンに合わせて表示切替が可能。必要ときに必要な情報のみを確認できます。

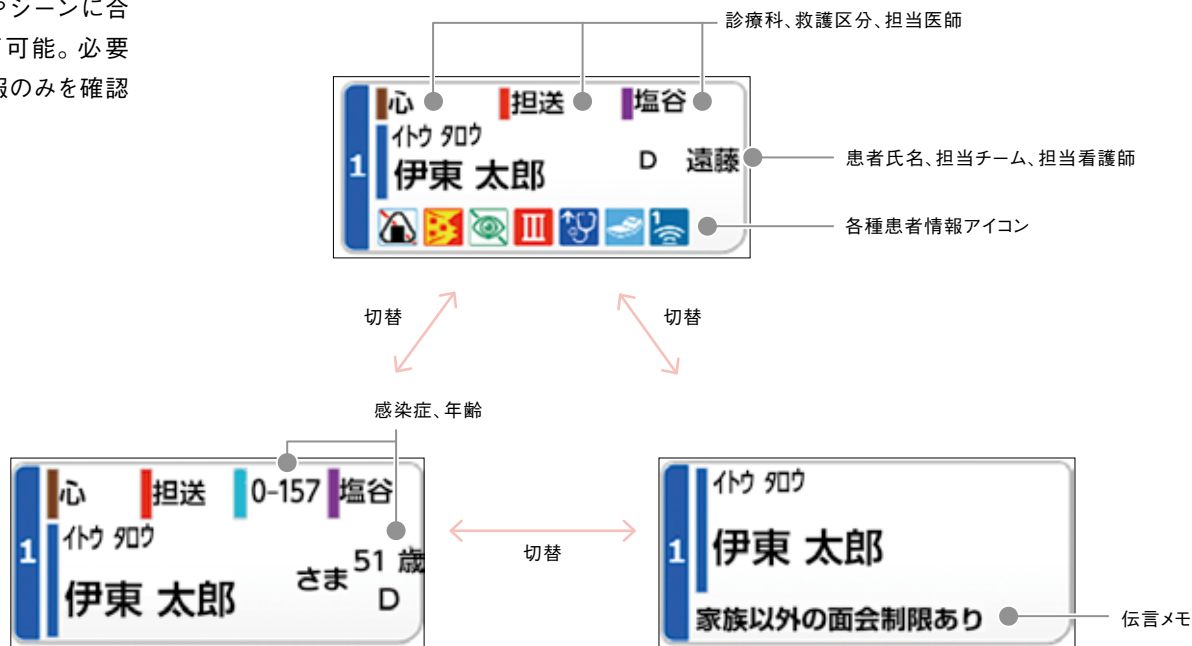

患者情報一覧

必要な情報のみを検索して閲覧できる

担当医師、担当看護師、担当チーム、診療科、入院日などで患者情報を抽出し、一覧表示することで効率的に情報が確認できます。巡回前の情報収集やケア計画の作成を支援します。

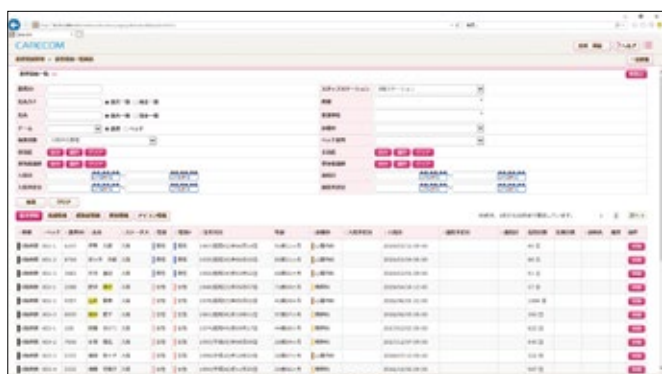

回診表示

診療科別や担当医師別に患者さんが把握できる

診療科別、担当医師別にベッド表示画面の該当する患者さんを赤枠で強調表示します。また、個別情報廊下灯では、回診対象患者の氏名を表示し、回診時の業務効率の向上を図ります。



ホワイトボード表示

画面上で患者情報や病棟情報が共有できる

病棟スタッフ間で共有すべき各種情報が、ホワイトボードに手書きしていた従来の方法よりも手間なくスピーディーに共有できます。

患者誤認などの防止に役立つ情報

- ① 同姓同名患者表示
- ② 患者移動情報表示
(入院退院、転入転出、外出外泊)

物品管理に役立つ情報

- ③ 患者情報表示のアイコン数集計

感染管理に役立つ情報

- ④ 感染症情報

空床管理に役立つ情報

- ⑤ 空床情報
- ⑥ 移動情報／入退院者リスト

災害時に役立つ情報

- ⑦ 患者数情報
- ⑧ 救護区分情報

ホワイトボード表示画面(参考)

※画面は変更となる場合があります。

患者予定シェアボード機能ソフト ※オプション

業務量の把握や多職種間での情報共有に役立つ

病棟内の全患者を対象に看護部以外の他部門と関わり合いのある患者予定を進捗状況とともに1つの画面内に集約して表示します。入退院、検査、手術、他科受診、面談などの予定がある患者さんを一覧表示するとともに、進捗状況をアイコンで確認できます。また病棟内のメモ情報もフリー入力して共有できます。

患者予定シェアボード画面(参考)

※画面は変更となる場合があります。

チームナーシング設定自動割付機能ソフト ※オプション

スマートフォン・PHSのチームが自動で設定できる

電子カルテ側から看護師の受け持ち患者情報を取得してスマートフォン・PHSチームナーシング設定を自動で行います。

※2022年発売予定


親機 機能紹介

ベッドトレース機能ソフト ※オプション

院内感染が発生した場合の 拡大阻止に役立つ

入院から転棟・転ベッドの記録をトレースすることが可能。院内感染が発生した場合、その患者さんの軌跡が確認できるので、二次・三次感染の疑いがある患者さんを早急に特定できます。

※画面は変更となることがあります。

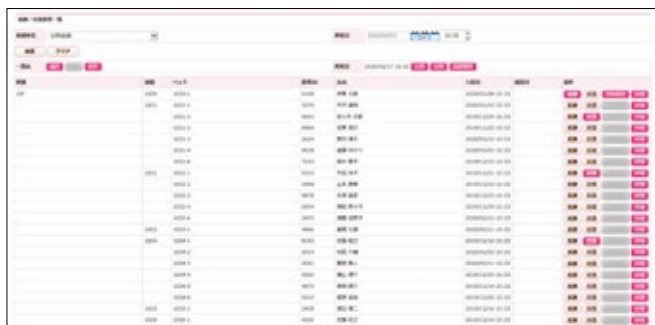

ベッドトレース画面(参考)

過去のベッド配置を再現して、感染の可能性が高い患者さんをさまざまな観点からリストアップが可能。



移動履歴／同室患者表示(参考)

ベッドの移動履歴と同室患者情報を表示することで、同室による感染の可能性が高い患者さんを簡単にリストアップ可能。



追跡／注意患者一覧表示(参考)

感染もしくはその疑いのある患者さんをリストアップして一覧表示可能。帳票出力やデータ加工用にCSV出力も可能。


重症度、医療・看護必要度ソフト ※オプション

重症度や看護必要度が一目で確認できる

A得点、B得点、C得点の登録が簡単にできます。各項目の基準、説明文が画面上に表示されます。病院個別項目を登録して、独自の看護必要度集計が可能です。「様式10の3」の出力内容を集計し、CSV出力できるので、集計作業を大幅に削減できます。患者さんごとの評価結果も1カ月単位で印刷できます。

※特注ソフトです。

※画面は変更となることがあります。

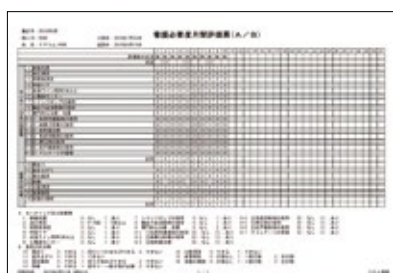

個人月間評価票(参考)



評価入力画面(参考)



評価入力画面(参考)

ハンディナースコールシステム 機能紹介


チームナーシング

いつも担当の看護師が 呼出に出てくれる安心感

受け持ちの患者さんからの呼出は担当看護師のスマートフォン、PHSを優先的に呼出します。勤務帯やチームの変更も親機で設定できて便利です。

夜間は別チームに呼出転送することも可能

看護師の少ない夜間は、呼出を別チームに転送することもできます。また複数の病棟からの呼出に回答可能なスマートフォン、PHSを設定できます。

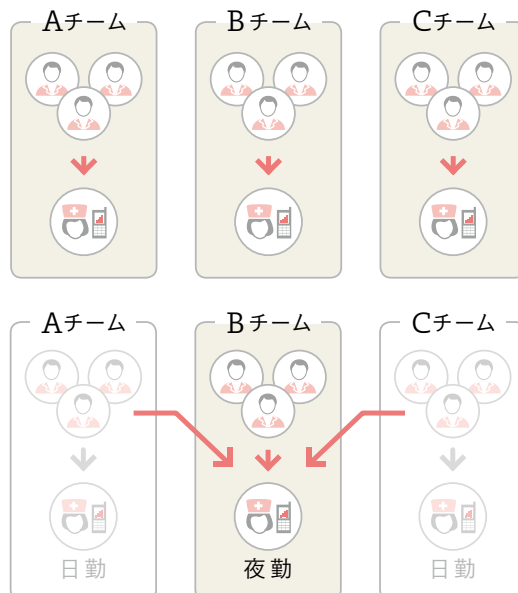


呼出種別鳴り分け

呼出すスマートフォン、PHSを 呼出種別で振り分けられる

一般の呼出は看護師と看護補助者のチーム全体へ、トイレ介助の呼出は看護補助者へ、そして緊急呼出や生体情報モニタ呼出は看護師へ。


呼出内容や緊急度によって呼出すスマートフォン、PHSを区分けでき、患者さんへのスムーズな対応や業務効率化に役立ちます。

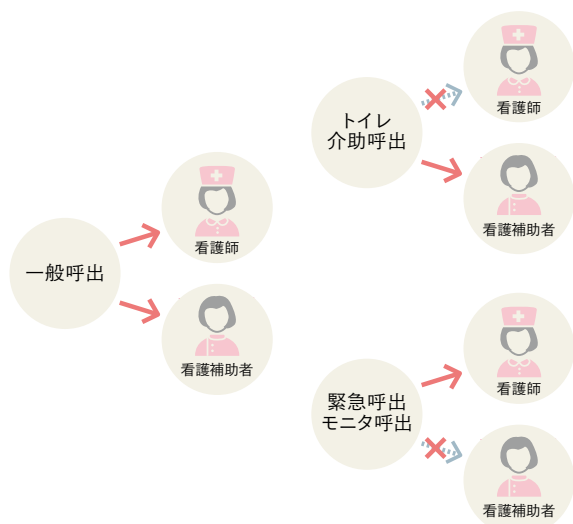

同時複数通話

同時に5通話対応可能で つながらない不安を解消

スマートフォンやPHSと連動して、最大5人の患者さんと5人の看護師が同時に通話できます。不通になる機会が減り、患者さんがイライラしたり、不安になるのを防げます。

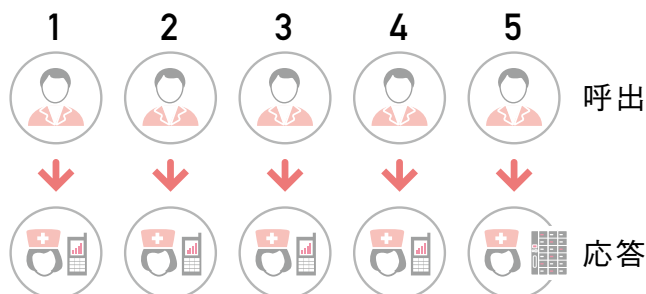

構成機器

● 病室 / ベッドサイド

ハンド形子機／握り押ボタン

すべらない、持ちやすい、わかりやすいデザイン。
患者さんに「いつでもつながる安心」をお届けできます。

掛けやすく、落下しにくい ラバー素材リング

ハンド形子機のリング部分にラバー素材を使用。静かでスムーズな掛け外しができます。



握りやすい 曲面フォルム

握り押ボタンは、手にしっくりなじみ、握りやすいデザインです。



1 大きくて押しやすい呼出ボタン

ハンド形子機のボタン面は大きく、本体前面の押しやすい位置に配置しました。握り押ボタンは、ボタン部分のふくらみを本体上部よりやや隆起させた状態にし、押しやすい設計にしています。



2 常夜灯 暗くても確認できる常夜灯

照明が消された病室でも、子機の位置がわかる常夜灯付き。呼出確認灯も兼ねています。
※親機からの操作により、常夜灯をオフにすることができます。



3 ギャッチアップ時のずり落ちを防止

ハンド形子機の裏面にラバー素材のすべり止めがあるので、ギャッチアップしても落ちてきません。



4 特定呼出 識別しやすい特定呼出ボタン

「トイレ介助」「点滴終了」を知らせるボタンは、それぞれ色と形が異なり識別しやすい設計。声を出さずに、押すだけで呼出内容を伝えることができ、夜間や多床室で便利な機能です。


5 呼出確認トーン 呼出中であることを音でお知らせ

呼出中は患者さんにも確認トーンが聞こえ、呼出中であることが確認できます。呼出せていないのでは？という不安解消に役立ちます。


6 見つけやすいオレンジコード

コードはベッドリネン上でもはっきり識別できるオレンジ色。子機を見つけやすく、またコードに気づかずに起こるトラブルの防止にも役立ちます。

ハンド形子機

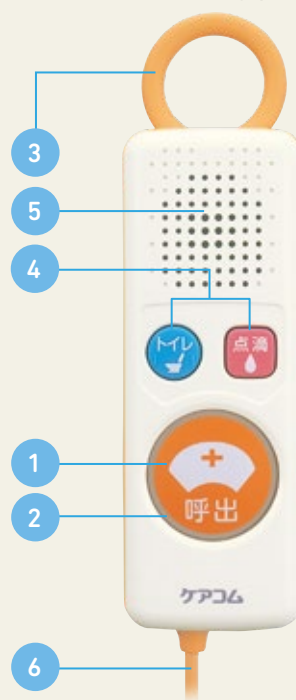

握り押ボタン

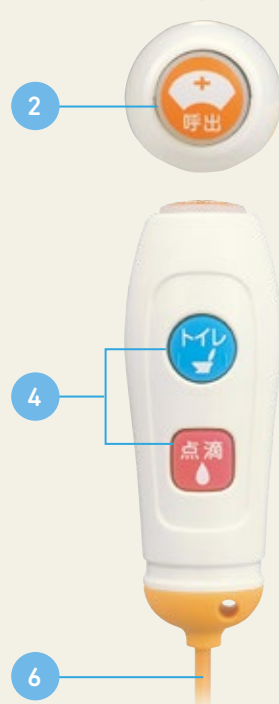

壁埋込形子機／ハンド形子機コンセント

断線トラブルを防止するコネクタ。

どの方向からの引っ張りにも対応

オプションの中継コネクタを使用すると、断線トラブル防止にいつもの効果があります。上下左右を含めさまざまな方向からの引っ張りに対応します。

※特定呼出機能の有無に関係なく、使用できます。

※引っ張りの角度によって、壁側でも脱落する場合があります。

※特許取得済。

コネクタを外すとお知らせする脱落警報はベッドサイドで保留にすることが可能


一時的にナースコール子機をコンセントから外す場合、脱落警報が鳴らないよう復旧ボタンを押しながらコンセントから外すと脱落警報を保留にすることができます。



復旧ボタンを押しながら、プラグ(ナースコール子機)をコンセントから抜くと脱落警報が保留されます。プラグをコンセントに戻すと保留が解除され、通常通り使用できます。

フックアタッチメント

握り押ボタンの置き場を解決、簡単に取り付け・コードを仮固定できるアタッチメントをご用意。

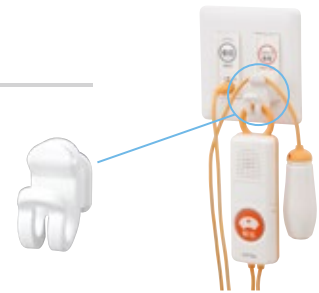

子機アタッチメント

患者さんの状態に応じて選べるアタッチメントをご用意。

※握り押ボタンは別売です。

握って呼出できる子機に



※特許取得済

押して呼出できる子機に



※特許取得済

無線押ボタン

病室内、居室内で利用できる手のひらサイズの無線押ボタン。

軽くタッチするだけでOK

指の力が弱い方でも、簡単にボタンが押せます。

コードへのひっかかり、断線への不安を解消

コードレスなので、ベッドなどの配置も自在にできます。

確実に呼出できる安全配慮が万全

送受信の状態の自動確認など、さまざまな配慮を施しています。



無線押ボタン

センサー受信機

手のひらサイズ



安心の自動再送

無線押ボタン
使用にあたっての注意

- 無線押ボタンを病室・居室内で使用する際は、必ず有線の握り押ボタンやハンド形子機を併用して、補助的なボタンとしてお使いください。
- 無線押ボタンはセンサー受信機が設置された室内から持ち出さないでください。
- 呼出をかけたことを患者さんが認識できるよう、室内にスピーカー(アラーム)や表示灯(呼出確認灯)を必ず設置してください。

構成機器

● 病室 / ベッドサイド

マルチアクシード 2A

ナースコール子機のコンセントに 差し込むだけで各種センサーからの 呼出内容が識別できます。

マルチアクシードを取り付けておくと、センサーからの呼出があった場合、親機やPHSにどのセンサーからの呼出なのかが表示され、適切な対応に役立ちます。また、センサーの表示名称は親機側で患者さんごとに個別に設定できて便利です。

2種類のセンサーの 接続が可能

マットセンサーやベッドセンサーなど、
接続接点が2種類まで増やせます。

設置性にも配慮

ベッドや柵にフックで引っ掛けて取り付
けられるコンパクトサイズ。工事不要で、
簡単に設置できます。



BI-2WZ

マットセンサー

患者さんがベッドから離れると、 自動的に呼出します。

マットに荷重がかかるとセンサーが検知し、自動で呼出します。転倒や徘徊の心配
がある患者さんにおすすめです。

床の色調に合わせて、2色のカラー（ナチュラルブラウン色、グレー色）からお選びい
ただけます。

コードによるつまずき・断線のリスクが軽減できる「無線マットセンサー」もご用
意しています。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。



ナチュラルブラウン色



グレー色

センサー用コンセント付 ハンド形子機コンセント／壁埋込形子機



ハンド形子機コンセント



壁埋込形子機



センサーを接続するコンセント（入切スイッチ付）が併設されています。センサーの表示名
称は親機側で患者さんごとに個別に設定でき、その名称に応じて呼出の優先順位も変更
できます。

分配コンセント（入切スイッチ付）

センサー用コンセントが
ないハンド形子機コンセ
ントや壁埋込形子機で
ナースコールとセンサー
が併用できます。



建築付帯専用

ベッドサイド表示システム
CARE VIEW U

ベッドサイドの
ネームプレートをデジタル化。
安全管理と業務効率化に
貢献します。

ベッドサイド表示器

- 視認性の高い5.7インチのカラー液晶を採用。
- デザイン性が高く、病室の意匠にマッチします。
- 新築・増改築・リプレース等に対応する建築付帯専用です。



業務効率が向上

NICSS親機や電子カルテと連動し、入院・退院・ベッド移動に合わせて、患者氏名などの表示を自動更新。ネームプレートの作成時間と、交換に要するスタッフの動線を削減します。

安全管理に貢献

紙製ネームプレートと比べ、多くの情報が表示できるため、スタッフの情報共有を促進し、安全管理に貢献。また、ネームプレート作成時の転記ミスや、交換時の取り違いリスクが減少します。



●ハンディナースコールシステム

スマートフォン連動

WiFi配下のスマートフォンと連動でき、
迅速で的確な対応が可能です。

スピーディーな着信

呼出に対して、NICSS親機とほぼ同時に鳴動し、応答時間短縮や安心・安全管理に貢献します。

グラフィカル表示

NICSS親機が有する多彩な患者情報をグラフィカルに表示し、的確に状況を把握できます。



スマートフォン

※IP-PBXおよび端末の機種により、表示内容が異なります。


PHS 連動

スタッフステーションにいらなくても、
その場で呼出を受けられます。


院内のどこにいても受発信ができます。
呼出が重なっても、割り込み音で通知してくれるので安心です。
ナースコールと内線電話は呼出音が異なり、音で呼出先が確認できます。



PHS

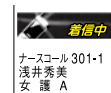

一般呼出・脱着警報・
特定呼出等の場合

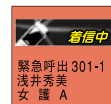

緊急呼出の場合

※表示内容はPHSの機種や設定により異なります。

構成機器

●廊下

個別情報廊下灯

呼出時に患者情報を表示してお知らせ。
選べる2タイプをご用意。

わかりやすい表示、
プライバシーにも配慮

液晶画面は、通常時は患者さんのプライバシー保護のためイメージ写真を表示。カードをかざす、もしくは画面に触れると病室内の患者さんの氏名が表示されます。




イメージ写真表示

card
or
touch
→



患者氏名表示

RFID
カードリーダー
付

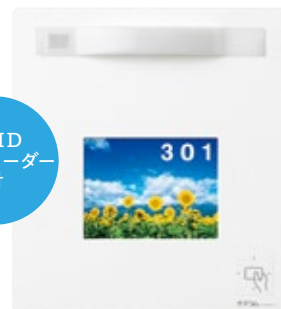

3色の点滅で
呼出種別を表示

代表灯と液晶画面は呼出種別に応じて色分け表示。呼出内容の緊急度がひと目で確認できます。



オレンジ

・一般呼出 ・トイレ介助
・点滴終了 ・脱落警報

赤

・緊急呼出
・トイレ／浴室呼出

緑

・センサー呼出

RFID
カードリーダー
なし



個別廊下灯・代表廊下灯

呼出理由を色で知らせます。

患者さんの
プライバシーを保護

必要なときだけ患者名を確認できるワンタッチスライド機構のプライバシーカバーを用意しました。(プライバシーカバーは別売です。)



氏名表示状態



氏名非表示状態



3色の代表灯点滅で
呼出種別を表示

代表灯は呼出種別に応じて色分け表示。呼出内容の緊急度がひと目で確認できます。

オレンジ



・一般呼出 ・トイレ介助
・点滴終了 ・脱落警報

赤



・緊急呼出
・トイレ／浴室呼出

緑



・センサー呼出

● 病室 / 病棟入口

ドアホン・電気錠連動


ドアホンや電気錠との連動により親機やスマートフォン・PHSで来訪者への対応ができます。

親機やスマートフォン・PHSで来訪者と通話可能
スタッフステーションからは親機で、移動中はスマートフォン・PHSでドアホンと通話でき、スタッフの動線短縮に役立ちます。



親機やスマートフォン・PHSから
電気錠を解錠することが可能

玄関や病棟入口に電気錠を設置した場合、親機やスマートフォン・PHSから解錠することができます。

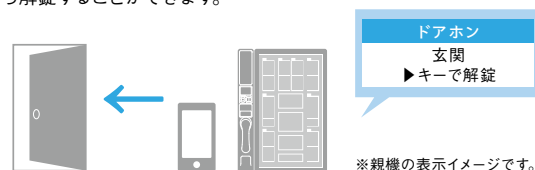

IP カメラ連動

IPカメラとの連動で、カメラがとらえた映像を親機やスマートフォンに表示します。

親機で映像の確認が可能

ナースコールに連動して親機にカメラがとらえた映像を表示。呼出時の様子を確認でき、事故を未然に防ぐことができるほか、防犯対策にも役立ちます。



スマートフォンでも映像確認が可能

親機だけでなく、スマートフォンでも映像を確認できるので、スタッフステーションにいないスタッフも適切な対応がとりやすくなります。



● トイレ

トイレ離座検知システム

患者さんの立ち上がり動作を検知してお知らせ。

トイレでの転倒リスクを軽減します。

前方ボードの動きを検知

TOTO株式会社製の前方ボードの動きをトイレ離座センサー（前方ボード用）が検知して、患者さんが立ち上がろうとしていることをスタッフに通知します。

便座への長時間の着座を検知

トイレ離座センサー専用ウォシュレット*が、長時間便座に患者さんが座っている状態を検知してお知らせします。

※検知時間（5分または10分）と検知の有無は選択が可能です（初期値は10分で検知有）。

便座からの離座を検知

TOTO株式会社製のトイレ離座センサー専用ウォシュレット*が荷重の変化から患者さんの立ち上がり動作を検知して、スタッフに通知します。

※検知後の報知までの時間は1、2、3秒から選択が可能です（初期値は1秒）。

*ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。



関連製品一覧

● スタッフステーション



NICSS親機デスクトップ形
※ディスプレイ:23型(壁掛け可能)
(受注品)



NICSS親機デスクトップ形
※ディスプレイ:32型(壁掛けイメージ)
※別途パソコンが必要です。
(受注品)



NICSS親機壁掛形
※ディスプレイ:32型
※別途パソコンが必要です。
(受注品)



大型サブディスプレイ
※ディスプレイ:43型
(受注品)



NICSSモバイル機能ソフト
※パソコン用とスマートフォン用の
ソフトウェア使用ライセンスのご提供です。
※写真のナースカートは株式会社オカムラ製
スマートナースカートです。



制御機(EX用)

製品名	型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
制御機(EX用)タイプS	BZM-001EX	459×318×128	¥1,170,000
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	459×318×128	¥1,432,000

※別途データ設定費が必要です。

データ設定費

製品名	型名	価格(税別)
EX制御機タイプS	BZ-001DSAEX	¥100,000
EX制御機タイプM	BZ-002DSAEX	¥140,000
EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	BZ-001DSBEX	¥140,000
EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	BZ-002DSBEX	¥170,000



液晶表示式親機(EX用)

製品名	型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
液晶表示式親機(EX用)	BZD-01EX	170×135.5×256	¥442,000



PZ-206-CP

コネクタ付ローゼット

型名	仕様	寸法(W×H×Dmm)	コード	価格(税別)
PZ-206-CP	PC対応*	70×34×136	約1.3m	¥16,700

※生体情報モニターなどの連動用

●ハンディナースコールシステム



PHS主装置(受注品)

※ナースコール、PHS接続装置の台数によりお見積もりいたします。



PHS接続装置

型名	寸法(W×H×Dmm)
HI-HI-D3BS	250×145×32

(受注品)

※ID付と無しのタイプがあります。

1台目はID付となります。

※モジュラージャックPZ-303 ¥3,200(税別)が別途PHS接続装置の台数分必要です。



PHS

型名	寸法(W×H×Dmm)
HI-D8PSWPIISET	45×120×17

(受注品)

●廊下



個別情報廊下灯(タッチパネル式)

型名	仕様	価格(税別)
BL-802WZB-TPID	1~2床用、RFID対応	¥282,000 ※2
BL-806WZB-TPID	3~6床用、RFID対応	¥298,000 ※2
BL-802WZB-TP	1~2床用	¥180,000
BL-806WZB-TP	3~6床用	¥193,000

(受注品)

※1 寸法(mm)／W245×H270×D23(突起物を除く)

※2 RFIDカードリーダー付(RFIDカードは含まれていません)



RFIDカード(mifareUL、10枚入)

型名	価格(税別)
Z-131MI-10	¥12,500



個別廊下灯(特定呼出機能付)

型名・仕様	価格(税別)
BL-501WZC(1床室用、3色)	¥56,800
BL-502WZC(2床室用、3色)	¥61,700
BL-503WZC(3床室用、3色)	¥66,500
BL-504WZC(4床室用、3色)	¥71,400
BL-506WZC(6床室用、3色)	¥81,200
BL-502WZC-T(1床室(トイレ付)用、3色)	¥61,700
BL-503WZC-T(2床室(トイレ付)用、3色)	¥66,500
BL-504WZC-T(3床室(トイレ付)用、3色)	¥71,400
BL-505WZC-T(4床室(トイレ付)用、3色)	¥76,300
BL-507WZC-T(6床室(トイレ付)用、3色)	¥88,100
BL-501WZC-X(1回線用、3色)	¥56,800

※寸法(mm)／W225×H220×D30

※プライバシーカバーは別売です。

※価格には室番印刷が含まれています。

※室番印刷の変更および書体・印刷色以外の指定については別途費用がかかります。弊社営業担当にお問い合わせください。

プライバシーカバー取付例




氏名非表示状態



氏名表示状態

※プライバシーカバーは上げた状態で止めることができます。

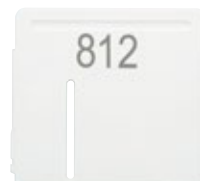

プライバシーカバー

型名	仕様	価格(税別)
Z-128/3	1~3床室用	¥2,000
Z-128/6	4~6床室用	¥2,000

※寸法(mm)／W193.2×H170×D4

※価格には室番印刷が含まれています。



BL-673U/15-A

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BL-673U/15-A	70×120×27.5	¥4,700

※製品の価格にプレートは含まれていません。

代表廊下灯(丸形、15V、オレンジ・赤・緑)

型名	寸法(mm)	価格(税別)
BL-113/15-A	φ90×D18.3	¥5,100



BL-113/15-A



復旧ボタン

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BR-303ZAU	70×120×6.5	¥1,700

※製品の価格にプレートは含まれていません。



I/Oユニット

型名	仕様	価格(税別)
BX-101WZC	1回線1廊下灯用、3色	¥55,700
BX-106WZC	6回線1廊下灯用、3色	¥80,700
BX-404WZC	4回線4廊下灯用、3色	¥70,400
BX-101WZC-DK	ドアホン・電気錠連動	¥63,000

※寸法(mm)／W225×H220×D26

※画面はハメコミ合成です。

※NICSS®は、株式会社ケアコム®の商標です。

※型名にUが付くものは、別途カバープレートが必要です。

※価格には消費税は含まれていません。

関連製品一覧

● 病室 / ベッドサイド



RB-826WZ



RB-830WZ



BA-611WZ



BA-612WZ



BA-303WZU



BA-304WZU



BA-306WZU



BB-105WZU



BF-122WZU



BF-123WZU



BF-322WZU



BB-109WZU



BF-124WZU



BA-307WZU



HP-331



HP-431



握り押ボタン

ハンド形子機 (握り押ボタン付)

型名	ピン数	寸法 (mm)	コード長	価格 (税別)
RB-826WZ	6P	φ35×H99.5	約2m	¥3,500
RB-830WZ	6P	φ35×H99.5	約2m	¥4,800
BA-611WZ	6P	49×168×27.5 (本体)	各約2m	¥14,500
BA-612WZ	6P	49×168×27.5 (本体)	各約2m	¥23,500

※RB-830WZ、BA-612WZは、特定呼出ボタン付。

ハンド形子機コンセント / 壁埋込形子機

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
BA-303WZU	162×120×7	¥20,200
BA-304WZU	162×120×7	¥19,400
BA-306WZU	208×120×7	¥22,100
BB-105WZU	70×120×7	¥16,900
BF-122WZU	116×120×7	¥17,700
BF-123WZU	116×120×7	¥18,600
BF-322WZU	208×120×7	¥28,000

※製品の価格にプレートは含まれていません。

センサー用コンセント付

ハンド形子機コンセント / 壁埋込形子機

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
BB-109WZU	116×120×7	¥23,100
BF-124WZU	162×120×7	¥25,700
BA-307WZU	208×120×7	¥33,300

※製品の価格にプレートは含まれていません。

ホワイトプレート

型名	仕様	価格 (税別)
HP-331	ホワイトプレート (3個用9コ穴)	¥1,600
HP-431	ホワイトプレート (4個用12コ穴)	¥2,300

ベッドサイド表示器

型名	寸法 (W×H×Dmm)
BD-01WZ (特)	208×120×23

※ご採用については、仕様の打ち合わせが必要となりますので、弊社営業担当までご相談ください。



RB-101TX



センサー受信機

無線押ボタン

型名	寸法(mm)	価格(税別)
RB-101TX	φ60×D21.6	¥39,000

※単4アルカリ乾電池(2本)を使用
※電池寿命/約1年(1日10回呼出時)

無線押ボタンセット

(無線押ボタンRB-101TX+センサー受信機のセット販売)

型名	寸法(mm)	価格(税別)
RB-101TX-SET(WZ)	W75×H114×D34	¥76,000

※寸法はセンサー受信機
※ACアダプター付属



フックアタッチメント

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
Z-603WZ-25	21.6×42.1×41.6	¥9,000

※1パック25個入り



マルチアクシード2A

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BI-2WZ	130×180×34	¥52,900

※接続接点×2種類
※ACアダプター付属



4つの機能を1台に!

- 1.タッチコール機能
- 2.プレスコール機能
- 3.ボイスコール機能
- 4.光センサーコール機能

※この製品は病院・福祉施設以外で
使用しないでください。

マルチケアコール

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
RB-780A	110×640×161	¥39,500

※マットクリップ付属 ※ACアダプター付属
※3Pメタルコンセントに接続の場合、3Pメタコンプラグ付コード[PZ-780-3P
¥1,600(税別)]が必要になります。

マットセンサー

- ・床の色調に合わせて選べる2色のカラー
- ・マットセンサーと一般のオンスコールの呼出を区別して親機に表示
- ・2つに折りたためる折り目付き



RS-102BRA



RS-103GYA

分配コンセント



BB-301WZ-3P/
W6P-OP1

<グリップ形>



<プレス形>



子機アタッチメント

型名	仕様	寸法(mm)	価格(税別)
Z-801WZ	グリップ形	φ43×115.7	¥1,300
Z-802WZ	プレス形	106×190×44.7	¥1,800

マットセンサーセット

マットセンサー	型名	製品名	セット内容	価格(税別)
ナチュラル ブラウン色	RS-102BRA-SET(WZNC)	マットセンサーセット(ブラウン2PWZ一般)	①+⑤	¥51,000
	RS-103BRA-SET(WZOP)	マットセンサーセット(ブラウン3PWZ特定)	②+⑥	¥53,000
グレー色	RS-102GYA-SET(WZNC)	マットセンサーセット(グレー2PWZ一般)	③+⑤	¥51,000
	RS-103GYA-SET(WZOP)	マットセンサーセット(グレー3PWZ特定)	④+⑥	¥53,000

マットセンサー：ナチュラルブラウン色：①RS-102BRA ②RS-103BRA / グレー色：③RS-102GYA ④RS-103GYA
単品価格(税別)：RS-102BRA,RS-102GYA ¥42,000 / RS-103BRA,RS-103GYA ¥43,000

分配コンセント：⑤BB-301WZ-2P/W6P-NC ¥16,000(税別) ⑥BB-301WZ-3P/W6P-OP1 ¥19,000(税別)

※マットセンサー：寸法 W1000×H450×D6mm、抗菌仕様、防滴(IP61)仕様、コード約3m

※分配コンセント：寸法 W75×H114×D34mm、コード約2m

■無線マットセンサーもご用意しております。詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。

※型名にUが付くものは、別途カバープレートが必要になります。
※価格には消費税は含まれていません。

関連製品一覧

●浴室



浴室用引きスイッチ

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BB-721ZR	79×140×25	¥19,500



BT-312ZR



呼出押ボタン

型名	仕様	価格(税別)
BT-311ZR	ひも無	¥6,800
BT-312ZR	ひも付	¥7,400
BT-313ZR	ひも無、復旧付	¥7,800
BT-314ZR	ひも、復旧付	¥8,400

※寸法(mm)／W70×H120×D11.5、引きひも600
※引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23
※点字内容「よびだし」付



壁埋込形子機(呼出ボタン付)

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BA-203WZ	116×120×11.5	¥38,500

※防水性能 IPX5
※点字内容「よびだし」付

●トイレ / 共用部



BT-311ZR



呼出押ボタン

型名	仕様	価格(税別)
BT-311ZR	ひも無	¥6,800
BT-312ZR	ひも付	¥7,400
BT-313ZR	ひも無、復旧付	¥7,800
BT-314ZR	ひも、復旧付	¥8,400

※寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23
※点字内容「よびだし」付



BT-321ZR

呼出押ボタン(赤プレート)

型名	仕様	価格(税別)
BT-321ZR	赤プレート	¥7,600
BT-322ZR	赤プレート、ひも付	¥8,200
BT-323ZR	赤プレート、復旧付	¥8,600
BT-324ZR	赤プレート、ひも、復旧付	¥9,200

※寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付属
寸法(mm)／小：W51×H15、大：W71×H41



壁埋込形子機

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BA-305WZU	162×120×7	¥18,200

※製品の価格にプレートは含まれていません。




車いすトイレ用押ボタン

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
RB-771	139×38×49	¥21,500

※コード約2m
※取付可能なパイプは直径φ34mm～39mmの丸パイプ
または40×32mmの楕円形パイプ
※コンセント(BB-107ZCU ¥8,500(税別))に接続
※特許取得済



BS-331Z

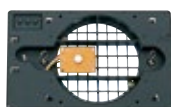

BM-331Z



BS-300P

天井埋込スピーカ子機+丸形パネル

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BS-331Z	215×134×64	¥6,200
BS-300P(パネル)	φ180×D13.5	¥2,200

※接続するI/Oユニット、個別廊下灯はZBタイプをご使用ください。

天井埋込マイク子機+丸形パネル

型名	寸法(W×H×Dmm)	価格(税別)
BM-331Z	215×134×64	¥8,100
BS-300P(パネル)	φ180×D13.5	¥2,200

※接続するI/Oユニット、個別廊下灯はZBタイプをご使用ください。

●トイレ離座検知システム



RS-201U-T BB-402ZAU-T

トイレ離座センサー(前方ボード用)セット

セット型名	価格(税別)
RS-201AU-SET	¥58,000

セット内容
トイレ離座センサー(前方ボード用) RS-201U-T
※寸法(mm)／W70×H120×D32
トイレ離座センサー入切スイッチ BB-402ZAU-T
※寸法(mm)／W70×H120×D7



BB-101U-T1 BB-402ZAU-T

トイレ離座センサー(便座用)セット

セット型名	価格(税別)
RS-202AU-SET	¥49,800

セット内容
トイレ離座センサー(便座用)コンセントコード付
BB-101U-T1
※寸法(mm)／W70×H120×D7
※便座接続用コード 約1.5m
トイレ離座センサー入切スイッチ BB-402ZAU-T
※寸法(mm)／W70×H120×D7

● エリア検知呼出システム



リストバンド取り付けイメージ
(リストバンドは含まれておりません)

ICタグ

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
TTX-301-LG-5	47.4×11.8×27.7	¥96,000

※5個入り ※約12g(電池含む)



IoTゲートウェイ

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
TRX-302-GW	125×125×34	¥121,000



IoTコントローラー

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
TLM-001	250×250×45	¥398,000



電源装置

型名	寸法 (W×H×Dmm)	価格 (税別)
ED-201	160×59×250	¥26,000

※ネットワーク機器、ソフト、サイトサーベイ、導入サポートが別途必要です。

安心の保守サービス体制

24時間365日、お客様のシステムを、ケアコムが見守ります。

患者さんの命を預かる病院で、業務中に何かが起こったとき、一秒でも早く本来の業務に復帰することが大切です。ケアコムでは、万一の製品・システムの不具合に対して、専門の技術者が直接対応するサービス体制を整えています。

1 保守契約サービス

お客様のニーズに合わせて
メニューの選択ができます

修理の24時間受付や外観、構造、電気的検査、機能検査といった点検を定期的に行います。
お客様のニーズに合わせてお選びいただけるよう4つのプランをご用意しています。

- Aプラン…24時間受付
- Bプラン…24時間受付+保守点検実施
- Cプラン…24時間受付+保守点検実施+無償修理
- Dプラン…フルメンテナンスサービス

その他に、お客様ごとの専用プランをご用意することも可能です。

2 リモートメンテナンス契約サービス

24時間365日、コールセンターにて対応いたします。
NTT回線(お客様ごとの契約)の利用により、遠隔地でも即座にトラブル対応や設定変更にあたるすることができます。
信頼と安心のセキュリティ対策でリモート敷設済みお客様数全国658施設(2021年3月現在)。

システム状況を把握
しながら的確にサポート

病棟のパソコン画面状態をコールセンターで確認できるので、どう操作したらよいかなど、同じ画面を見ながら的確にサポートできます。


万全のセキュリティ体制

何重ものアクセスチェックにより、不正アクセスを防止するなど、万全なセキュリティ対策に取り組んでいます。


※株式会社ケアコムは一般財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)認定の「プライバシーマーク」を2005年2月22日付で取得しています。

※型名にUが付くものは、別途カバープレートが必要になります。
※価格には消費税は含まれていません。


系統図

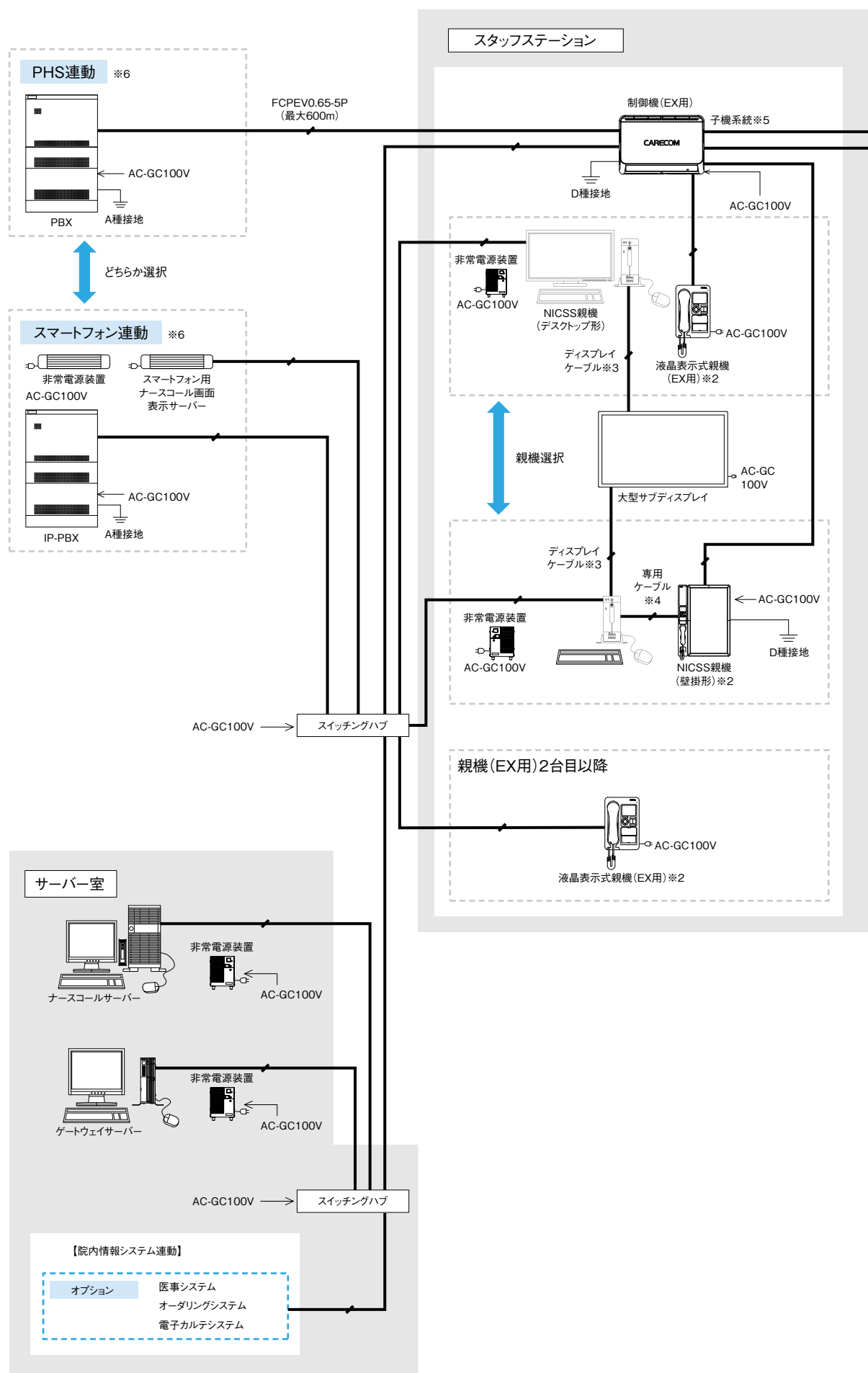

子機系統(個別情報廊下灯接続時)

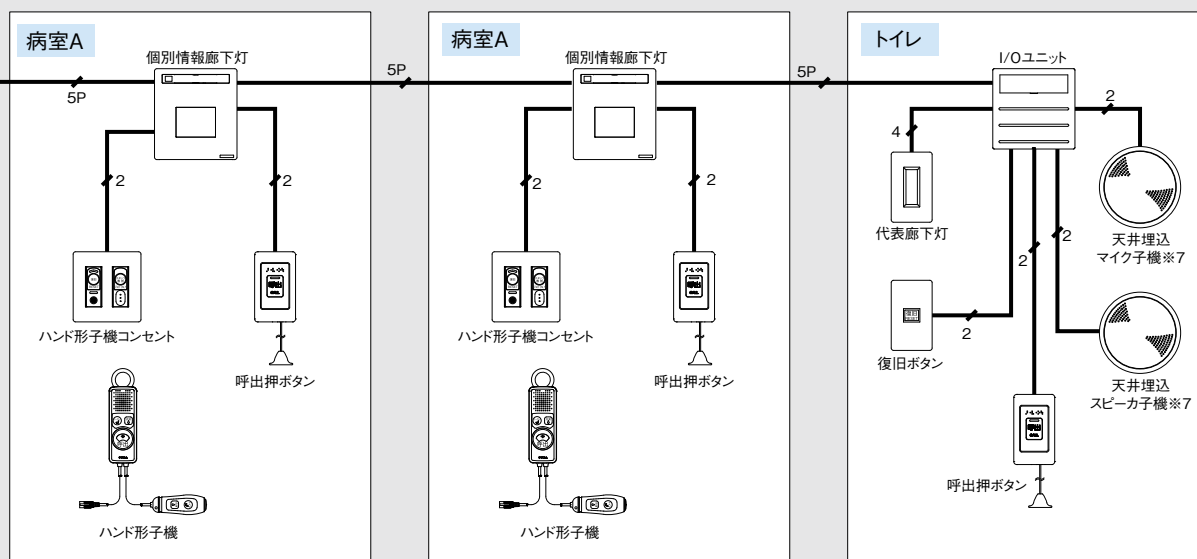

子機系統(個別廊下灯接続時)

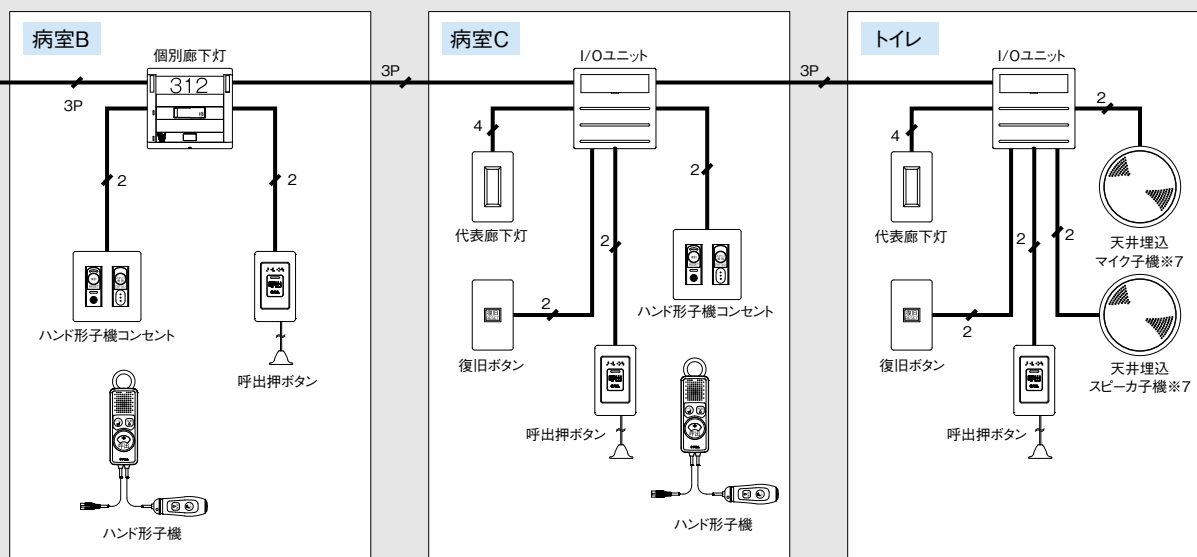

※1 ネットワークは100Base-TXを推奨。(最大100m)

※2 親機(EX用)は最大8台まで接続できます。1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。

※3 標準添付品。別途10mケーブルも用意しています。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。

※4 標準添付品のディスプレイケーブルは1.8m、USBケーブルは1.8mです。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。

※5 子機系統の総配線距離は1系統あたり最大200mです。個別情報廊下灯を使用しない場合の線種はFCPEV0.9-3Pです。また接続可能な機器の最大数は下表の通りです。(制御機を増設することで、個別廊下灯・I/Oユニット等の接続台数を増やせます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください) また、子機系統はバス配線とし、系統を分岐する場合は1分岐のみとしてください。


個別廊下灯接続時		個別廊下灯・I/Oユニット		子機	
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計
制御機(EX用)タイプS	BZM-001EX	20台	25台	40台	80台
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	20台	40台	40台	160台

個別情報廊下灯接続時		個別情報廊下灯・I/Oユニット		子機	
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	10台	25台	40台	80台

※6 基地局・アクセスポイントと端末が必要です。スマートフォン連動の場合、ネットワークの構成によりルーターが必要になります。詳細はPBXメーカーにお問い合わせください。

※7 天井埋込マイク子機、天井埋込スピーカ子機を接続する場合のI/Oユニット・個別廊下灯については弊社営業担当までお問い合わせください。

※8 個別情報廊下灯・個別廊下灯・I/Oユニット→子機間の配線は、回線ごとに単独ケーブルで配線してください。(最大30m)

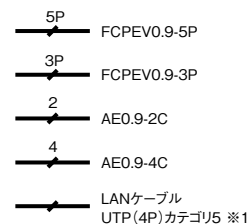

ヘルスケア情報統合型ナースコール

PLAIMH NICSS

プライマ ニックス

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------|
| PL | Platform (プラットフォーム), People's Life Care (人々のライフケア) | N | Nursing (看護) |
| AI | Artificial Intelligence (人工知能), Alert & Information (アラート&情報) | I | Information (情報) |
| M | Matrix (基盤), Management (管理) | C | Communication (コミュニケーション) |
| H | Healthcare (ヘルスケア) | SS | Support System (支援システム) |

PLAIMH NICSSは、多様なヘルスケア情報を統合し、有効に活用できるように開発された新しいヘルスケア情報統合型ナースコールです。

ケアする人、される人それぞれに快適な環境をお届けしたい。

PLAIMH NICSSには私たちケアコムが強い想いが込められています。




ケアコムは、
● プライバシーマーク
● 品質マネジメントシステム
「ISO 9001:2015」(全社)
● 環境マネジメントシステム
「ISO 14001:2015」(群馬工場)
の認証企業です。



◎ご使用の際には、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
このカタログに掲載している商品の設置工事や使用法に関しては、各商品ごとに詳細な資料や取扱説明書を用意しています。安全に正しくご使用いただくために、設置やご使用前にこれら関連資料をよくお読みください。

お問い合わせは

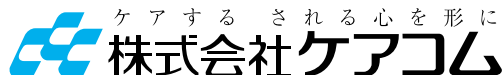

東京オフィス(代表) 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13-7 名古屋ビル本館1F
Tel.050-3816-6300(代) Fax.050-3737-9707 ☎0120-047-533

札幌支店 Tel.011-272-1511	仙台支店 Tel.022-272-8781	北関東支店 Tel.0270-20-4051
埼玉支店 Tel.048-799-3273	東関東支店 Tel.043-350-3431	東京第1支店 Tel.050-3816-6301
東京第2支店 Tel.042-485-7312	南関東支店 Tel.045-250-5067	名古屋支店 Tel.052-731-5361
大阪第1支店 Tel.06-4964-1895	大阪第2支店 Tel.06-4964-1896	北陸担当窓口 Tel.06-4964-1892
岡山支店 Tel.086-238-8913	広島支店 Tel.082-568-5951	高松支店 Tel.087-885-3623
福岡支店 Tel.092-714-5345	熊本支店 Tel.096-375-7090	
営業開発グループ Tel.050-3816-6304 CSサービスクラウド Tel.042-485-7306		

ケアコムホームページ <https://www.carecom.jp/> ケアコムはNursing-plaza.comを支援しております。

- 製品は性能・品質改良のため、仕様・外観等を予告なしに変更することがあります。また、掲載製品の色は印刷上、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品の画像はハメコミ合成です。性能・品質改良のため、予告なしに変更することがあります。
- 価格には消費税は含まれていません。