



お手入れガイド ナースコール子機

ナースコール子機のお手入れについてご説明します。

握り押ボタン



ハンド形子機



下記の 環境消毒用途薬品 を推奨しています。

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム
- ・ アルコール
- ・ 第4級アンモニウム塩
- ・ 両性界面活性剤
- ・ クロルヘキシジングルコン酸塩



- ・ 各消毒液の取扱説明書の指示に従い希釈してお使いください。
- ・ 研磨剤やメラミンスポンジなどは使用しないでください。
- ・ 噴霧式の洗剤や消毒剤を直接吹きかけないでください。
- ・ 弾性素材部分にはアルコールを使用しないでください。



ケアコム
CARECOM



ST402066