



お手入れガイド 親機・廊下灯

ナースコール機器のお手入れについてご説明します。

NICSS 親機



個別情報廊下灯



下記の 環境消毒用途薬品 を推奨しています。

- 次亜塩素酸ナトリウム
- アルコール
- 第4級アンモニウム塩
- 両性界面活性剤
- クロルヘキシジングルコン酸塩



- 各消毒液の取扱説明書の指示に従い希釈してお使いください。
- 研磨剤やメラミンスポンジなどは使用しないでください。
- 噴霧式の洗剤や消毒剤を直接吹きかけないでください。
- 液晶パネルの取り扱いには十分ご注意ください。



ケアコム
CARECOM



ST402067